

INSTRUCCIONES BREVES

mediNiK® para la extracción de cálculos



VÍDEO DE FORMACIÓN

Para obtener más información,
visite www.medinik.de.



mediNiK®
Purenum

UN PRODUCTO DE



FARCO

1. Llenar una jeringa vacía con 1 ml de solución de NaCl al 0,9 %.
2. Desconectar la irrigación.
3. Jeringa K1 (**azul**): liberar el punto de presión, conectar al canal de trabajo y aplicar bajo visión directa.
4. Introducir cuidadosamente 1 ml de NaCl al 0,9 % en el canal de trabajo.
5. Jeringa K2 (**amarilla**): liberar el punto de presión, conectar al canal de trabajo y aplicar bajo visión directa.
6. Introducir la cesta extractora de cálculos en el canal de trabajo.
7. Volver a conectar la irrigación e iniciar la extracción del cálculo.