

1. Eine leere Spritze mit 1 ml 0,9 % NaCl aufziehen
2. Spülung ausschalten
3. Spritze K1 (**blau**): Druckpunkt lösen, mit dem Arbeitskanal verbinden und unter Sicht applizieren
4. 1 ml 0,9 % NaCl vorsichtig in den Arbeitskanal geben
5. Spritze K2 (**gelb**): Druckpunkt lösen, mit dem Arbeitskanal verbinden und unter Sicht applizieren
6. Steinfangkörbchen in den Arbeitskanal einführen
7. Spülung wieder einschalten und Steinbergung starten

KURZANLEITUNG

mediNiK® zur Steinbergung



SCHULUNGSVIDEO

Weitere Informationen finden
Sie auf www.medinik.de



mediNiK®
Purenum

EIN PRODUKT DER



FARCO